




みなさん、こんにちは。テックです！
土用過ぎの暑い日が続いておりますが、いかにお過ごしでしょうか。
今回のテックスタイルは、自在水栓のメンテナンス方法です。
訪問入浴サービス提供中に、ハンドルが回りにくいときは、
分解調整を行っていただけますようお願いいたします。



自在水栓のメンテナンス方法



自在水栓のハンドルのネジ蓋をカッター等で取り外します。

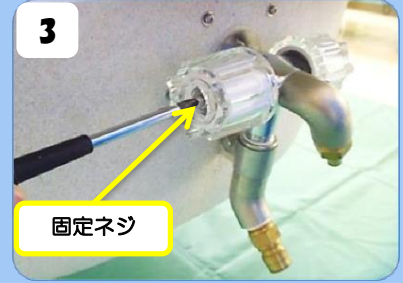

固定ネジ

プラスドライバーを使用して、内部の固定ネジを取り外します。




ハンドルを取り外します。




栓棒セットのパッキン押さえをモンキーレンチで取り外します。




内部の栓棒セットを矢印の方向に回しながら取り外します。

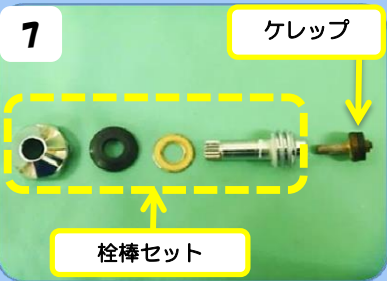


自在水栓の内部には、栓棒セットとケレップの5種類の部品があります。

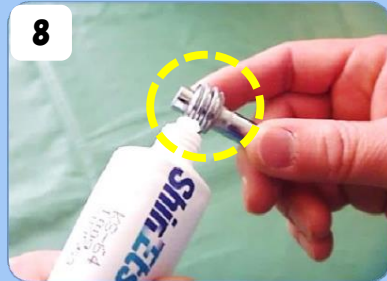

栓棒ネジ部分にオイルコンパウンドを塗付します。

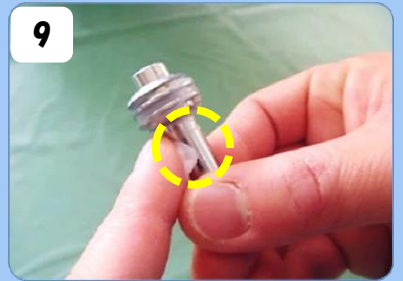

上記の点線丸部分にも塗付します。

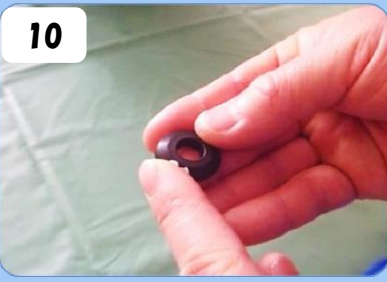

三角パッキンにも塗付します。



逆の手順にて、再度組み立てていただいて終了です。

22 栓棒セット 入浴専用

GGGGG1



栓棒セットはデベロでも取り扱っております。
商品コード【GGGGG1】
¥330(税別)

