



ベッドと浴槽に橋を架けて移乗の負担を軽減します

# スライディングボードD

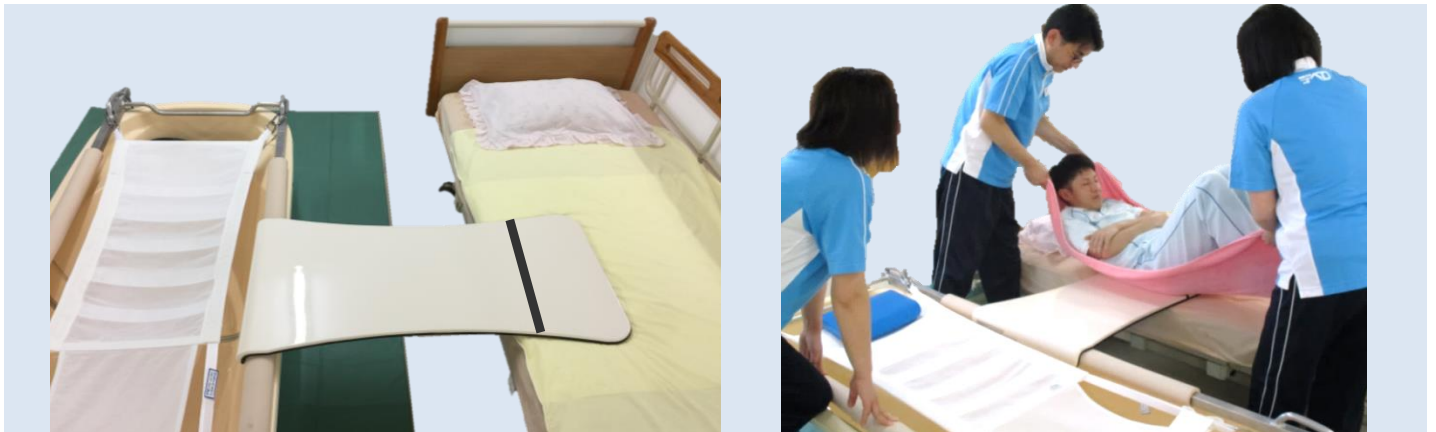

## スライディングボードDの特徴

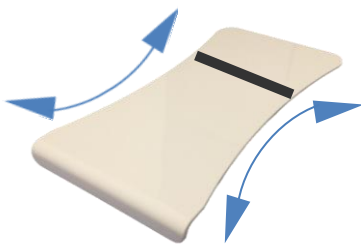


持ちやすさ、移乗時によりご利用者へ身体を寄せられるよう曲線的なデザインを採用しました。

当社浴槽にぴったりと合う折り返しで安定性を確保します。



Size

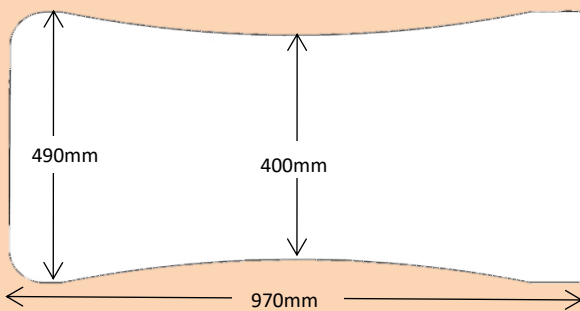

価格 **¥ 39,000** (税別・送料別)

どなたでもお買い求め頂けます。\*

※デベロ製製品との適合品です。他社製製品と合わせてご使用される場合は、保証適用外となります。ご使用される方が安全性の確認を十分にお取りください。

※本製品は補助具ですので、全体重を受け止めるものではありません。

十分に注意を払ってご使用下さい。

QRコードを読み取ると  
スライディングボードDの動画がご覧いただけます。



申込FAX番号 029-247-2214

商品名	単価(税別)	数量	合計価格
スライディングボード	¥39,000		

団体名		印
住所		
TEL ( ) —	担当者	印

(株) **デベロ**

☎ 310-0841 茨城県水戸市酒門町1744-2

☎ **029-247-2211** (代) FAX 029-247-2214

ホームページ <http://www.develo-group.co.jp>

デベロ

入浴福祉推進部まで

# 「スライディングボードD」ご使用の方法


## ◎事前の準備

本製品は、あくまでも移乗補助用具ですので、ご利用者の全体重を受け止めるものではありません。耐荷重は約100kgを基準としておりますが、ご使用の方法や頻度により耐久性には異なりが生じます。ご使用の方法を正しくお守りいただき、ご使用前には不具合等がないかのご確認をお願いいたします。



浴槽にお湯を入れた状態で、ベッドと浴槽側にスライディングボードを置きます。  
※ベッドと浴槽の距離はできるだけ近づけます。ベッド側にはスライディングボードを30cm以上載せてください(注意ラインをご参照ください)。

※折り返し部分を浴槽タンカ側にぴったりと設置します。

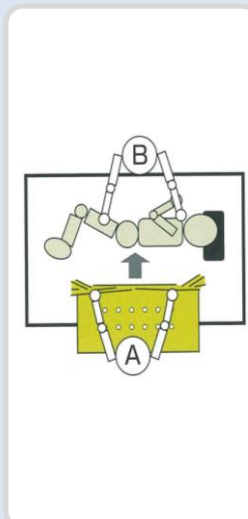

スタッフAがご利用者の下にシート(タオルや摩擦軽減シートなど)を敷きこみやすいようにまとめます。

スタッフBが利用者を側臥位にしている間に、シートを敷きこみます。(生地の大きさ、強度、持ち手の確保など事前に確認を行いましょ)

## ◎ご利用者の移乗



①スタッフ「頭側A」、「足側B」でタイミングを合わせ、ご利用者の身体が一定の高さを保持した状態で、シートごとにご利用者の身体をスライディングボードにのせます。  
※スタッフ「腰側C」は浴槽の反対側で注意喚起を行います(タンカ枠やスライディングボードがずれないように注意してください)。

②ご利用者を浴槽側にスライドさせる、もしくは、スライドボードを中継点として半身をのせます。



③スタッフ「頭側A」、「足側B」が体の向きを変えます。(腰痛予防のためにも浴槽のほうを向きます)

④スタッフ「腰側C」が浴槽反対側からご利用者の腰部を支え、全員でタンカネット上に寝かせます。

⑤タンカネット上で注意しながら、ご利用者の身体を半側臥位にし、シートをとります。

## 使用上のご注意

・用途以外の目的では使用しないでください。

製品の破損やけがの原因となります。デベロ製製品との適合品です。他社製製品と合わせてご使用される場合は、保証適用外となります。ご使用される方が安全性の確認を十分にお取りください。

・ベッドと浴槽の距離は出来るだけ近づけ、しっかりと設置できているか確認してからご使用ください。

製品の破損やけがの原因となります。

・本製品に何かしらの異常が起きた場合は、速やかにご使用を中止してください。

製品の破損やけがの原因となります。